




آپی ای

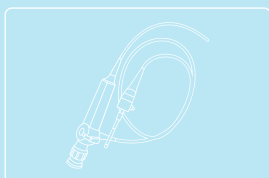

محلول ضد عفونی کننده سطح بالا مناسب برای تجهیزات پزشکی، ابزار دندانپزشکی و آندوسکوپ های حساس به دما

هایسپت آپی ای یک محلول ضد عفونی کننده سطح بالا و مناسب برای تجهیزات پزشکی، تجهیزات مراقبت از بیمار، ابزار دندانپزشکی و آندوسکوپ های حساس به دما است. این محصول حاوی ارتوفتالدهید ۰/۵۷۵٪ به عنوان عامل ضد عفونی کننده با اثربخشی آنتی میکروبیال سریع و وسیع الطیف است. این محصول میکروارگانیزم های بیماری زای تجهیزات پزشکی، شامل همه ابزار نیمه بحرانی حساس به دما و بخار را از بین می برد.

مزایای مصرف

- حاوی ارتوفتالدهید ۰/۵۷۵٪
- اثربخشی آنتی میکروبیال وسیع الطیف
- آماده به مصرف بدون نیاز به فعال کننده
- قابل استفاده مجدد تا ۱۴ روز



مشخصات محصول

رنگ / شکل	محلول شفاف و بی رنگ
pH	۶-۸
بو	بوی مشخصه
طول عمر قفسه ای	۲۴ ماه



THIS IS A HISEPT PRODUCT, WITH
**HIGH-LEVEL
SAFETY &
PROTECTION**

ترکیبات

مقدار ترکیب (در هر ۱۰۰ گرم هایسپت آبی ای)
 • ۵۷۵٪ گرم ارتوفتالدئید

مواد جانبی

- عوامل کی لیت دهنده
- عوامل بافری کننده
- عوامل بازدارنده
- آب دیونیزه

طیف اثر میکروبی

منطبق با استانداردهای اروپایی

اثر بخشی علیه باکتری

According to EN 13727 (contact time: 10 minutes)	Staphylococcus. aureus/ ATCC 6538 Enterococcus. hirae/ ATCC 10541 Pseudomonas. aeruginosa/ ATCC 15442 Escherichia. coli/ ATCC 10536
According to EN 14561 (contact time: 10 minutes)	Staphylococcus. aureus/ ATCC 6538 Enterococcus. hirae/ ATCC 10541 Pseudomonas. aeruginosa/ ATCC 15442

اثر بخشی علیه مخمر

According to EN 13624 (contact time: 10 minutes)	Candida. albicans/ ATCC 10231
According to EN 14562 (contact time: 10 minutes)	Candida. albicans/ ATCC 10231

اثر بخشی علیه قارچ

According to EN 13624 (contact time: 10 minutes)	Aspergillus. niger/ ATCC 16404
According to EN 14562 (contact time: 15 minutes)	Aspergillus. niger/ ATCC 16404

اثر بخشی علیه اسپور باکتری

According to EN 13704 (contact time: 60 minutes)	Bacillus. subtilis/ ATCC 6633
--	-------------------------------



روش مصرف

ابزار تمیز و فاقد آلودگی ظاهری را داخل محلول آماده به مصرف هایسپت آبی ای غوطه‌ور نمایید، بطوریکه تمامی حفره‌ها پر شده و حبابی باقی نماند، سپس درب محفظه را به مدت حداقل ۱۰ دقیقه ببوشانید. سپس ابزار را خارج نموده و با آب تمیز شستشو دهید.


سازگاری

هایسپت آبی ای با انواع مواد از قبیل استیل ضد زنگ، مس، پلی اتیلن، رابر، PVC، پلی اورتان و سیلیکون سازگار است.

2/2 Latest revision: Nov 1, 2023

بسته بندی

حجم ۵ لیتری	۳ عدد در هر کارتن
حجم ۱ لیتری	۶ عدد در هر کارتن

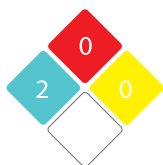

Hazard Rating

Ready-to-use	NFPA
Health	2
Flammability	0
Reactivity	0



هشدار

- محفظه‌ی ضدعفونی همواره با یک درپوش پوشانده شود. در صورت نگهداری در ظرف دربسته، محلول تا ۱۴ روز قابل استفاده خواهد بود.
- در صورت تماس با پوست یا چشم‌ها سریعاً موضع را با آب فراوان شستشو دهید و به پزشک مراجعه کنید.
- دور از دسترس کودکان و افراد نا آگاه قرار گیرد.
- در دمای بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتی‌گراد و دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.
- تماس با محلول ارتوفتالدئید ممکن است باعث ایجاد لکه در پوست یا لباس شود. توصیه می‌شود از دستکش نیتریل یا بوتیل استفاده کنید.
- در صورت استفاده از دستکش لاتکس، کاربر باید از دو دستکش روی هم استفاده کند و در صورت استفاده از یک دستکش، باید مکرراً آن را تعویض نماید.



Certifications

- >> ISO 9001: 2015
- >> ISO 13485: 2016
- >> GMP
- >> FSC



Middle East Office
Behban Pharmed Lotus Co.
 Address: Unit 113, 12 Floor, Bldg. B, Kaveh Complex, Azadi Ave., Tehran, Iran
 Tel: (+9821) 66581294-5/66581269

info@hisept.com

World Locations: Düsseldorf, Kuala Lumpur, Istanbul, Tehran, Baghdad